



Afb. 1



Afb. 2a



Afb. 2b



Afb. 2c



Afb. 2d

## Montage Widex S, M, P receiver

### Widex

Folie, holle uitvoering (zie Afb.1)  
Rode (rechts) en blauwe (links)  
bevestigingsring.

Widex - receiver (zie Afb. 2 a t/m c)  
opmerking: Widex 1 receiver heeft één  
randje zie pijl en past niet in dit schaalpje.  
(zie Afb 2.d)

### Plaatsen receiver.

Houd de receiver recht boven de rode of  
blauwe bevestigingsring  
En druk de receiver voorzichtig aan tot  
deze in de ring vast klikt (zie Afb. 3).

### Verwijderen van receiver.

Druk met behulp van Lifeshell tool de  
receiver voorzichtig terug (zie Afb. 5).

### Plaatsen van NanoCare filter.

Plaats NanoCare filter met behulp van tool  
(zie Afb. 4).



Afb. 3



Afb. 4



Afb. 5

### Artikel nummer Widex.

NanoCare filter

?

