



Afb. 1

Afb. 2



Afb. 3a



Afb. 3b



Afb. 3c

Montage GN Resound surefit LP, MP, HP

GN Resound LP, MP, HP

Folie, holle uitvoering (zie Afb. 1)

Massieve uitvoering (zie Afb. 2)

Typen receiver GN Resound

LP receiver (zie Afb. 3a)

MP receiver (zie Afb. 3b)

HP receiver (zie Afb. 3c)



Afb. 4



Afb. 5

Plaatsen receiver

Houd de receiver recht boven de transparante bevestigingsring druk de receiver voorzichtig aan tot deze in de ring vast klikt (zie Afb. 4).

Plaatsen van cerume filter

Plaats een cerustop cerumefilter in de receiver opening (zie Afb. 5)

Opm.: In de schaaltes kan de receiver draaien, dit heeft het voordeel dat er geen spanning op de draad komt te staan tijdens het dragen.



Afb. 6

Verwijderen van receiver

Druk met behulp van de Lifeshell tool de receiver voorzichtig terug (zie Afb. 6).

Trek de receiver nooit aan de draad uit het schaalte.